

2023年 7月 18日

お客様各位

多人数用透析液供給装置の給水電磁弁コネクタの改修について

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品・サービスをご愛顧くださり、御厚情に心よりお礼申し上げます。

弊社が製造販売しております多人数用透析液供給装置に使用している電磁弁のコネクタにおいて、圧着端子の変形が確認されました。調査の結果、製造工程において圧着端子の検査に用いる治具が変形しており、本不具合が発生していることが判明しました。

つきましては、貴院に納入いたしました対象装置の点検を行い、不具合を認めた場合は、部品交換の改修をさせていただきたいと存じます。

このたびの改修にあたり、貴院に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

謹白

記

1. 改修対象製品

多人数用透析液供給装置：DAB-70NX、DAB-50Si、DAB-70Si

2. 圧着端子の変形について

電磁弁に使用しているコネクタ内部の圧着端子に図3のような変形が生じている可能性があります。圧着端子が変形したまま使用を継続した場合、安定した動作制御を行うことができず、運転を中断せざるを得ない可能性があります。

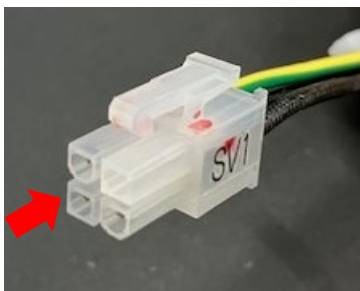


図1. 電磁弁コネクタ

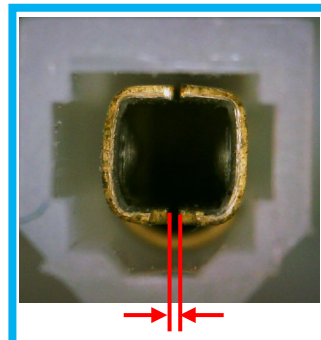


図2. 通常の圧着端子

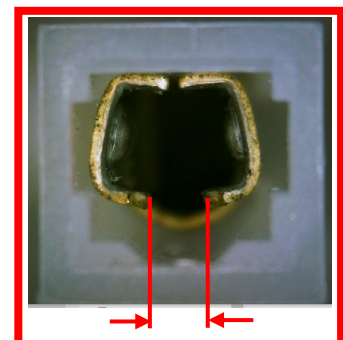


図3. 変形した圧着端子

3. 改修の内容

電磁弁のコネクタ点検の結果、圧着端子に変形が認められた場合、対象部品への交換および動作確認を実施します。

4. 改修までの流れ

貴院の対象装置につきましては、改修確認書にて弊社担当者よりご案内致します。改修の日程を調整させていただき、現地にて改修作業を実施いたします。

以上